



Valmistelu
1 ENNEN KUIN ALOITAT

- Varmistu että testin kaikki komponentit ovat samassa lämpötilassa (kuussa mainitun lämpötilan sisällä).
- Jos testi tai jotkin testin komponentit ovat olleet yllä mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella, anna niiden lämmitä huoneenlämpötilaan vähintään yhden tunnin ajan.
- Vältä testin suorittamista suorassa auringonvalossa, kuumilla tai kylmillä pinnoilla, tai lähellä kylmän / lämmönlähteitä.
- Laadunvarmistuskontrolleja voidaan käyttää tarvittaessa jos halutaan varmistua että testikitti toimii oikein. Tästä lisää ohjeen lisäselosteessa. Ota tarvittaessa yhteyttä myyjään.

Mittari (selkäpuoli)

Suorita testi 15 minuutissa

LOT 0628216

Pohjakorkki (älä poista vielä)

Suljettu testi-pakkaus

Kapillaari

Runko

ALÄ AVAAA HETI

LOT 0628216 EXP 2014 01 27

2014-01-27 YYY-MM-DD

LOT 0628216

CODE A1

Lot Numero ja päivämäärä

Varmista että Lot numerot täsmäävät

0628216

Verinäyte
2 KERÄÄ VERI

Sormenpästä

Käytä omaa lansettia verinäytteeseen

Kosketa veritippaa kevyesti kapillaarilla

Tai

Suoninäyte

Sekoita veri hyvin ennen näytettä

Kerää veri oikeassa kulmassa

45°

Liian vähän Lisää verta

Oikein

Liikaa Pyyhi ylimääräinen pois

Näytteen valmistus
3 KAPILLAARIN KÄYTTÄMINEN

Työnnä kapillaari näyteputken sisään huolellisesti

Paina hyvin!

Työnnä pohjaan!

Kiertäminen auttaa

Väärin asennettu! Työnnä pohjaan

Oikein

4 RAVISTAMINEN

Ravista näyteputkea 6-8 kertaa sekoittaaksesi veren kemikaaliin

Aseta näyteputki pöydälle pystyasentoon siksi aikaa kun valmistelet testikasetin

5 TESTIKASETTI

Käytä 2 minuutin kuluessa

Työnnä testikasetti paikalleen "click"

Täsmäävätkö koodit?

Ota tarvittaessa yhteys myyjään

Mittaaminen
6 MITTARIN VALMISTELU

ODOTA kunnes SMPL ilmestyy näytölle

VALMIS MITTAAMISEEN!

Poista pohja-korkki

Varmista että mittari on vakaalla alustalla

7 NÄYTE TESTIKASETILLE

On tärkeää että näyteputki tyhjenee kokonaan testikasetille. Paina näyte pohjaan saakka kuvan osoittamalla tavalla. Poista putki heti kasetin päältä kun valmis.

Älä käsittele mittaria analyysin aikana!

Tulokset
8 5 MINUUTIN ANALYYSI

Näytössä lähtölaskenta

QC testitulos*

Tulos

Jäljellä olevien testien lukumäärä

Tämä mittaustulos näkyy näytöllä 60 minuutin ajan tai niin kauan kuin uusi testikasetti asennetaan

* Jos "QCOK" ei ilmesty näyttöön niin ota yhteys myyjään. Lisätietoja virhetilanteista löytyy myös ohjeen lisäselosteesta

Ota tarvittaessa yhteys myyjään!

9 MITTAAMISEN JÄLKEEN

SÄILYTÄ MITTARI

POISTA TESTIKASETTI

MITATAKSESI UUDESTAAN: Ota uudet testipakkaukset esiin ja aloita uudelleen kohdan 2 mukaisesti

Lot

2014-01-27 YYY-MM-DD

LOT 0628216

CODE A1

Lot