



## Istumavaaka

Tyyppi 6880E  
Käyttöohje



KNORRING OY AB


00380 Helsinki, Karvaamokuja 6, puh. (09) 56 041  
telefax (09) 565 2463

- Jyväskylä, puh. (014) 614 100
- Turku, puh. (02) 435 5158




## Käyttöönotto

- 1) Asenna alkaaliparistot paristokoteloon. Huomioi paristojen napaisuus (kuva paristokotelon pohjassa).
- 2) Aseta vaaka tasaiselle alustalle. Vaaka on valmis punnitukseen.

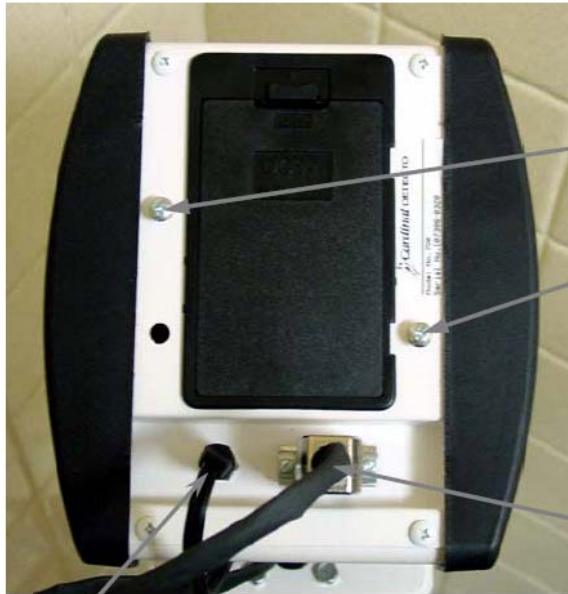

Anturi-  
kaapeli

Virta-  
lähde

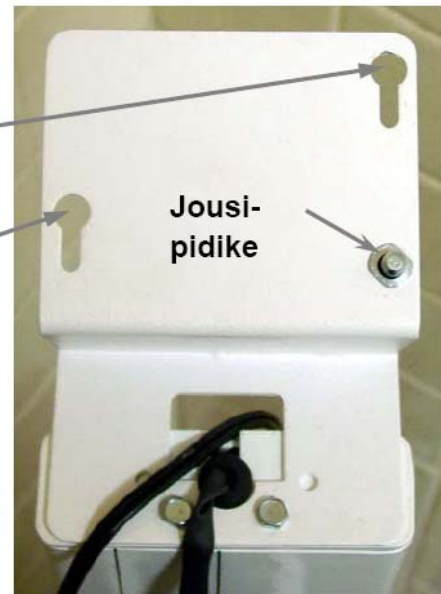


Jousi-  
pidike

Jousi-  
pidikkeen  
palautin



## KEYPAD FUNCTIONS

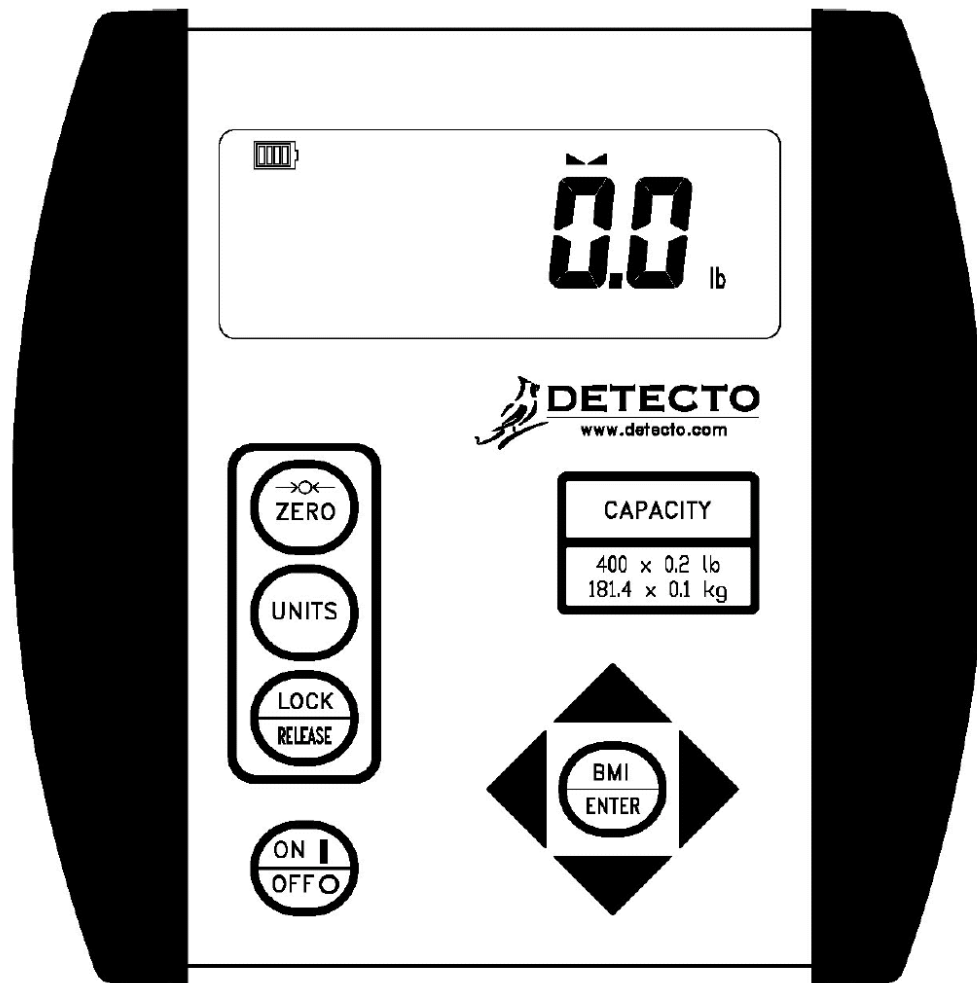

### Näppäimistö



Vaakapääte päälle/pois



Näytön nollaus



Painoyksikön vaihto (toiminto ei käytettävissä Suomessa)




Painonäytön lukitus (toiminto ei käytettävissä Suomessa)



### BMI-painoindeksitoiminto (Body Mass Index)

- 1) paina BMI-painiketta
- 2) syötä potilaan pituus nuolinäppäimillä (ylös/alas-nuolella muutetaan valittua numeroa, vasen-oikea-nuolella valitaan muutettava numero)
- 3) paina ENTER
- 4) näyttöön ilmestyy painoindeksi-arvo
- 5) paina BMI/ENTER palataksesi punnitustilaan

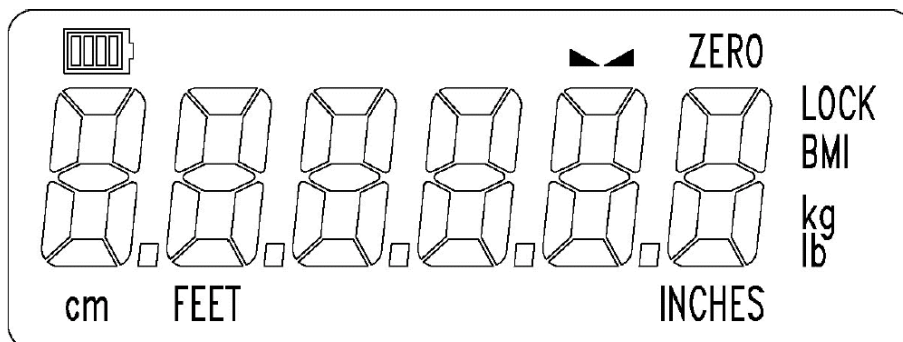

### Näytön merkkivalot



Näyttää alkaaliparistojen kapasiteetin (4 palkkia, 100 % 1 palkki, 25 % jne.) LO BAT-tekstin ilmestyessä näyttöön paristot on välittömästi vaihdettava.

### ▲▲ STABLE

Merkki palaa kun punnittava kuorma on stabiili

### ZERO

Merkki palaa kun vaakänäyttö on nollapisteessä

### LOCK

Merkki palaa kun painonäyttö on lukittu

### kg

Merkki palaa kun painoyksiköksi on valittu kilogramma (muut vaihtoehdot ei ole suomessa mahdollisia)

### cm

Merkki palaa kun BMI-painoindeksitoiminnon pituusyksiköksi on valittu senttimetrit (muut vaihtoehdot ei ole suomessa mahdollisia)

### BMI

Merkki palaa kun BMI-painoindeksitoiminto on käytössä

# NÄYTÖN VIESTIT JA VIRHEILMOITUKSET

Näyttö	Toiminto
<del>Err</del>	Yleisvirhe; näppäilyvirhe tai haluttu toiminto ei ole käytössä.
<del>OF</del>	Vaakapäätteelle yritetty syöttää pienempi arvo kuin -9,999 tai suurempi arvo kuin 99,999
<del>trL</del>	Vaakanäyttö nollausalueen ulkopuolella.
<del>UnS</del>	Vaaka ei ole riittävän stabiili yritettäessä nollata vaakaa.
AdErr	A/D muunninvirhe, ota yhteys vaakahuoltoon.
CALib	Virhe vaa'an kalibroinnissa, vaaka pitää kalibroida uudelleen.
ErrA	A/D muunninvirhe, ota yhteys vaakahuoltoon..
ErrAL	Voima-anturin signaali alueen alapuolella, ota yhteys huoltoon.
ErrAH	Voima-anturin signaali alueen yläpuolella, ota yhteys huoltoon.
EE Err	NOVRAM-virhe, ota yhteys vaakahuoltoon.
OCAP	Vaa'an kapasiteetti ylitetty.
OFF	Vaaka on sammutettu.

## TAKUU

Vaa'alla on kahden vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

## VAATIMUKSENMUKAISUUS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy alkuperäisestä englanninkielisestä käyttöohjeesta. Säilytä tämä ja kaikki muu dokumentaatio joka vaa'an mukana tuli, mahdollista myöhempää tarvetta varten.



